

ENTRETIEN DES SYSTEMES D'ASPIRATION XO

Afin de garantir le bon fonctionnement et la pérennité de votre équipement XO, il est indispensable de veillez à **l'entretien de votre système d'aspiration et de votre récupérateur d'amalgame**.

Pour cela, nous vous demandons de **suivre rigoureusement les indications décrites ci-dessous**.

Sachez que les produits indiqués sont disponibles en stock chez SIGMA.

1

DESINFECTION : CHAQUE JOUR (AU MOINS 2 FOIS PAR JOUR)

Votre fauteuil et unit XO dispose d'un système automatique de désinfection du système d'aspiration : **XO Suction Désinfection**

- ✓ Débranchez les tuyaux d'aspiration du support et retirez les embouts (*photo 1*)
- ✓ Appuyez **une fois** sur le bouton situé à côté des robinets de désinfection (*photo 2 - n°2*) pour désactiver l'aspiration
- ✓ Placez les deux tuyaux d'aspiration sur les robinets de désinfection (*photo 2 - n°3*) et réactivez l'aspiration en appuyant **une seconde fois** sur le bouton (*photo 2 - n°2*), le rinçage commence
- ✓ Le processus prend environ 6 minutes, selon la puissance de l'aspiration
- ✓ Les embouts d'aspiration peuvent être autoclavés à une **température maximale de 134°C**



Photo 1

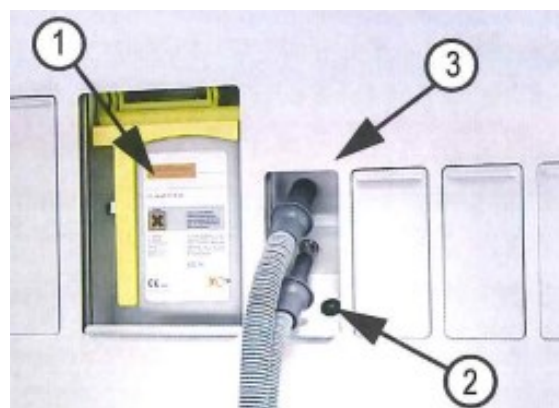


Photo 2

XO[®]

DÜRR DENTAL

Pour le nettoyage de votre système d'aspiration et de votre récupérateur d'amalgame, il est indispensable d'utiliser le produit **MD555 cleaner de DÜRR DENTAL**.

Très puissant, il agit contre les dépôts, les incrustations et les obstructions.

La procédure décrite ci-dessous est à appliquer **au minimum 1 fois par semaine, voire 2 fois en cas d'activité soutenue au fauteuil, lors de l'utilisation de produits à base de chlorhexidine ou l'utilisation de poudres pour aéropolisseur.**

Fauteuil AVEC crachoir

- ✓ Remplissez l'OroCup d'**eau froide** jusqu'au repère de 2L, placez le dans la position horizontale et aspirez toute la quantité d'eau
- ✓ Remplissez à nouveau l'OroCup d'**eau froide** jusqu'au repère de 2L
- ✓ Ajoutez **8 bouchons doseurs de MD 555** dans l'OroCup
- ✓ Agitez le mélange dans l'OroCup
- ✓ Fixez vos tuyaux d'aspiration sur les embouts de l'OroCup
- ✓ Placez l'OroCup dans la position verticale et aspirez 1L de solution (il vous reste automatiquement 1L de solution dans l'OroCup)
- ✓ Déversez la solution restante (1L) dans votre crachoir
- ✓ Laissez agir 1 heure à 2 heures max
- ✓ Après le temps de pause, remplissez l'OroCup d'**eau tiède** jusqu'au repère de 2L, placez le dans la position horizontale et aspirez toute la quantité d'eau

Fauteuil SANS crachoir

- ✓ Remplissez l'OroCup d'**eau froide** jusqu'au repère de 2L, placez le dans la position horizontale et aspirez toute la quantité d'eau
- ✓ Remplissez à nouveau l'OroCup d'**eau froide** jusqu'au repère de 1L
- ✓ Ajoutez **4 bouchons doseurs de MD 555** dans l'OroCup
- ✓ Agitez le mélange dans l'OroCup
- ✓ Fixez vos tuyaux d'aspiration sur les embouts de l'OroCup
- ✓ Placez l'OroCup dans la position horizontale et aspirez la totalité de la solution
- ✓ Laissez agir 1 heure à 2 heures max
- ✓ Après le temps de pause, remplissez l'OroCup d'**eau tiède** jusqu'au repère de 2L, placez le dans la position horizontale et aspirez toute la quantité d'eau

Bouchon doseur MD 555



Système OroCup



SIGMA

FAX : 04 50 22 81 09
accueil@sigma-dentaire.fr
www.sigma-dentaire.fr

Agence d'Annecy

18, rue de l'Euro
 Z.A. Actigone IV
 74960 MEYTHET
 TEL : 04 50 24 32 20

Agence de Lyon

Parc Technologique de Lyon
 Immeuble WOOD CLUB
 97, rue Alexandre Borodine
 69800 SAINT-PRIEST
 TEL : 04 37 25 84 12

